



atmungsaktiv

20 Stück  
je Beutel

# Ladies exklusiv

PARAM Inkontinenz-Einlagen

**NEU**  
Bestellen Sie jetzt  
Ihren Musterpack

Ladies  
**normal**

PZN - 15742753  
ca. 28 x 10,5 cm



Ladies  
**extra**

PZN - 15742977  
ca. 35 x 12 cm



Ladies  
**extra plus**

PZN - 15742983  
ca. 38 x 12 cm



Ladies  
**maxi**

PZN - 15743014  
ca. 40,3 x 14 cm



Ladies  
**super**

PZN - 15743037  
ca. 41 x 20 cm



Ladies  
**Musterpack**

PZN - 05466750



CE Medizinprodukt  
Medical device



**EXKLUSIV**



# Ladies exklusiv

## PARAM Inkontinenz-Einlagen

Hoher Tragekomfort  
bei absoluter Diskretion.

PARAM EXKLUSIV Ladies Einlagen sind die sicheren Begleiter für den Tag bei leichter bis mittlerer Blasen-schwäche. PARAM EXKLUSIV Ladies Einlagen sind besonders dünn und dennoch absolut sicher. Sie sind mit einer anti-bakteriellen, ph-neutralen Verteilerauf-lage ausgestattet, die für eine schnelle Aufnahme von Flüssigkeiten konzipiert worden ist. Das extrem starke Saugkissen verhindert gleichzeitig die Rücknässung.

Die weiche Oberfläche, die sehr weichen, elastischen Bündchen und seine atmungsaktive, raschelarme Außenseite sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und schützen die Haut vor Hautirritationen. Besondere Komponenten (Super-Absorber) schließen die Feuch-tigkeit im Kern des Produktes ein und neutralisieren eventuell auftretende Gerüche sicher. Ein durchgehend breiter Klebestreifen sorgt für den optimalen Sitz der Inkontinenz-Einlagen.




**Leistungsstark**  
in Sauggeschwindigkeit  
und Volumen




**Hoher Komfort**  
sehr weiche,  
elastische Bündchen



**Mehr Sicherheit**  
durch zuverlässige  
Geruchsneutralisierung

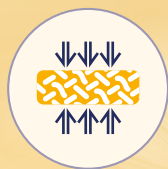

**Sehr hautfreundlich**  
atmungsaktiv, mit  
ph-neutralem Innenvlies

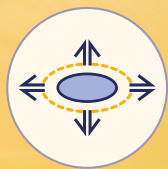

**Erhältlich in:**  
Normal, Extra,  
Extra plus, Maxi, Super

**NEU**  
Jetzt bestellen:

PARAM Hotline  
040-538 997 0

### Anlegetechnik

So einfach ist das Anlegen  
von PARAM Inkontinenz-  
Einlagen.



1. Schutzfolie vom Klebestreifen  
auf der Einlagenrückseite  
abziehen, Einlage in der Länge  
falten, um eine Schalenform  
zu erhalten.



2. Einlage mit der  
Klebeseite nach unten  
in die Hose legen.



3. Hose hochziehen  
und fixieren. Kontrollieren  
Sie abschließend noch  
einmal die Passform.



Param GmbH  
Bei der Neuen Münze 20  
22145 Hamburg  
GERMANY

040 - 538 997 0  
param@param.de  
www.param.de

**EXKLUSIV**

